

# gingi dam

## BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL

**GINGI DAM** é um protetor do tecido gengival para os procedimentos que possam causar irritação na gengiva (clareamento dental). Também pode ser utilizado como barreira junto ao grampo no isolamento absoluto para impedir a infiltração de saliva.

**Modo de usar:** **1.** ANTES DA APLICAÇÃO, RETRAIR O ÊMBOLO DA SERINGA PARA ALÍVIO DE PRESSÃO (EM MÉDIA 5mm).

**2.** Aplicar, com o auxílio da ponteira aplicadora, uma camada de aproximadamente 2mm de largura de GINGI DAM sobre a gengiva incluindo as papilas gengivais, previamente secas.

**3.** Fotopolimerizar o produto já aplicado por 20 segundos, para cada grupo de 3 a 4 dentes.

**4.** Conferir se toda a superfície gengival está protegida e a barreira polimerizada.

**5.** Ao término do procedimento desejado, remover o produto com um instrumento sem corte.

**6.** APÓS A APLICAÇÃO DA BARREIRA, É IMPORTANTE RETRAIR O ÊMBOLO DA SERINGA (EM MÉDIA 5mm) PARA NÃO OBSTRUIR A PONTEIRA APLICADORA.

**Precauções:** Não ingerir. Não utilizar em pessoas alérgicas ao componente da fórmula. Se observada alguma reação alérgica, interromper as aplicações.

**Armazenamento:** Manter em lugar seco e fresco, protegido da luz. Conserve o produto na embalagem original.

**Obs:** Este produto também pode ser utilizado como localizador de transfer na técnica de moldagem com moldeira aberta, para implantes dentários.

**Composição:** HEMA, UDMA, fotoiniciador, carga inerte e corante. VAL: 24 MESES



Fabricado por:

DENTALVILLE DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.101.363/0001-86

Rua Advogado Miguel Cercal, 645

Nova Brasília - Joinville - SC - 89214-610

Resp. Técnico: Aldo Castellani

CRQ-SC 13.400.397 13ªR

Reg. ANVISA: 10344110007

Fone/Fax: (47) 3454-2200

fale@villevie.com - www.villevie.com