



obturador provisório

NORMAL

USO PROFISSIONAL

Modo de usar:

Inserir o Obturador Provisório Villevie na quantidade adequada ao local a ser aplicado. O local deverá estar isento de umidade no momento da aplicação, evitando o deslocamento do curativo. Tem cura (endurecimento) entre 15 e 30 minutos e fácil remoção, sem uso de brocas ou outro instrumento especial.

Armazenamento: Manter em lugar seco e fresco, abrigado da luz.

Indicação e finalidade:

Massa provisória para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos restauradores e endodônticos, prevenindo contaminações.

Precauções/contraindicações: Não utilizar como restaurador definitivo.

Composição:

Óxido de Zinco, sulfato de cálcio, óxido de ferro amarelo, espessante, sulfato de zinco, óleo de silicone, aromatizante e gesso ortodôntico.

Não contém eugenol.

Reg. M.S. 10344110004

Quím.Resp. Aldo Castellani

CRQ-SC 13.400.397 13ªR

Validade: 24 meses.

Data de fabricação e lote vide fundo do pote.

Dentalville do Brasil LTDA

CNPJ: 01.101.363/0001-86

R. Adv. Miguel Cercal, 645

CEP 89214-610 - Joinville - SC

Fone: (47) 3454-2200

fale@villevie.com

www.villevie.com

INDÚSTRIA BRASILEIRA