

pasta profilática

SEM ÓLEO

INDICAÇÃO: Tem como finalidade remover manchas, detritos e placa bacteriana da superfície dental.

COMPOSIÇÃO: Pedra pomes, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, espessante, veículo, umectante, corante, aromatizante e conservante.

MODO DE USAR: Colocar a Pasta Profilática em um pote dappen para alimentar a taça de borracha e efetuar a profilaxia.

PRECAUÇÕES: Não usar em curtos períodos de tempo, isto provocará o desgaste do esmalte dental. **NÃO INGERIR.** Se ingerida poderá provocar náuseas. Conservar na embalagem original fechada, proteger da luz solar e evitar exposição a temperaturas acima de 25°C. Validade 24 meses.



villevie

Dentalville do Brasil LTDA

CNPJ: 01.101.363/0001-86

R. Adv. Miguel Cercal, 645

CEP 89214-610

fone/fax: 47 454-2200

fale@villevie.com

www.villevie.com

Reg. M.S.: 10344110002

Quim. Resp.: Aldo Castellani

CRQ-SC 13.400.397 13ºR

INDÚSTRIA BRASILEIRA

uso profissional