

Pedra Pomes

Material de Acabamento e Polimento

Uso Profissional

100g



Descrição do Produto: A Pedra Pomes é um pó fino, abrasivo, branco a acinzentado, inodoro.

Indicação: Indicada para limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.

Orientações ao Cirurgião-Dentista: A Pedra Pomes é um material abrasivo, que promove a remoção de placa bacteriana e manchas superficiais, além de promover polimento ao esmalte ou restaurações, conferindo uma superfície uniforme.

Instruções de Uso: Aplicar o produto no dente, puro ou com água, com auxílio de taças de borracha.

Composição: Pedra Pomes.

Contra Indicação: É contra-indicado a pessoas com sensibilidade aos componentes da fórmula.

Advertências e Precauções: Evitar o contato com pele e olhos, não ingerir, não inalar. Não utilizar com prazo de validade vencido ou caso a embalagem esteja violada. Manter o produto longe do alcance de crianças. Uso exclusivo do cirurgião dentista. Em caso de contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos e procurar orientação médica. Utilizar somente para uso odontológico. **Manuseio do Produto:** Recomenda-se o uso de luvas, máscara e óculos de proteção durante o

Armazenamento e Transporte:

Armazenar em local seco, ao abrigo da luz, em temperaturas entre 15°C e 30°C.

Lote e data de fabricação vide tampa.

Validade: 3 anos

Fabricado por:

DENTALVILLE DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.101.363/0001-86

Rua Advogado Miguel Cercal, 645

Nova Brasília - Joinville - SC - 89.214-610

Resp. Técnico: Aldo Castellani

CRQ-SC 13.400.397 13ªR

Reg. ANVISA: 10344110014

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fone/Fax: (47) 3454-2200

fale@villevie.com – www.villevie.com

