

# smart white



Clareador Dental  
Peróxido de Hidrogênio 6%



MANUAL DE INSTRUÇÕES



Fabricado por:  
DENTALVILLE DO BRASIL LTDA  
CNPJ: 01.101.363/0001-86  
Rua Advogado Miguel Cercal, 645  
Nova Brasília – Joinville – SC – 89.214-610  
Resp. Técnico: Aldo Castellani  
CRQ-SC 13.400.397 13ªR  
Reg. ANVISA: 10344110006  
INDÚSTRIA BRASILEIRA  
Fone/Fax: (47) 3454-2200  
fale@villevie.com – www.villevie.com

Clareador Dental para uso caseiro a base de peróxido de hidrogênio 6%, pronto para uso. Possui pH neutro, é de fácil aplicação e tempo de uso reduzido (30 minutos, aplicado 2 vezes ao dia).

#### INDICAÇÃO:

Indicado para clareamento de dentes vitais, aplicado em moldeiras individuais. Uso exclusivo sob a orientação do cirurgião-dentista.

#### COMPOSIÇÃO:

Peróxido de hidrogênio 6%, espessante, umectantes, estabilizante, seqüestrante, neutralizante e veículo.

#### ORIENTAÇÃO AO CIRURGIÃO-DENTISTA:

· O produto é utilizado em moldeira individual, arcada superior e/ou inferior, 2 vezes ao dia, por 30 MINUTOS de aplicação

(com intervalo mínimo de 6 horas entre uma aplicação e outra), o tempo de tratamento será definido pelo cirurgião dentista, conforme sua avaliação e acompanhamento. Em geral, o resultado do tratamento torna-se visível nos primeiros dias de uso.

· Avaliar a saúde gengival e dental do paciente. Existem problemas como, sensibilidade dentinária, lesões cariosas, fraturas e outras anormalidades que devem ser tratadas antes do início do clareamento.

· É recomendável profilaxia dental antes de iniciar o tratamento, para a remoção de cálculo, placa bacteriana e pigmentos extrínsecos para facilitar a visualização da cor. A profilaxia pode implicar em um aumento na sensibilidade dental durante o clareamento, por isso ela deve ser realizada, pelo menos, uma semana antes do início do tratamento.

· O acompanhamento do tratamento clareador, para avaliação e orientação do

paciente, deve ser realizado no máximo a cada 7 dias.

· Registro de cor: Registrar individualmente a cor inicial de cada elemento a ser clareado. Como sugestão, fotografe as arcadas do paciente, no início e no final do tratamento, para uma melhor visualização dos resultados.

· Oriente o paciente a colocar corretamente o gel na moldeira, conforme definido em "Modo de aplicação".

· Alguns pacientes podem sentir sensibilidade acentuada durante o tratamento, nesses casos deve-se aplicar o dessensibilizante SENSIS 0,2% (sensibilidade baixa a moderada) ou SENSIS 2% (sensibilidade alta). Caso a sensibilidade persista ou haja alguma reação alérgica ao produto, interrompa imediatamente o tratamento.

· Esclarecer sempre ao paciente sobre as reais possibilidades do seu caso e tempo de tratamento, que é dependente da

severidade do escurecimento.

- Pode ocorrer eventualmente o destaque de algumas áreas de hipocalcificação dentária durante o clareamento, podendo as mesmas desaparecer com a reidratação do dente ou com a utilização de flúor nessas áreas.

- Caso seja necessário substituir restaurações ou prótese, recomenda-se aguardar uma semana após a conclusão do tratamento, pois é neste período que ocorre a estabilização da cor dos dentes e também se previne algum eventual problema de adesão de materiais restauradores.

#### MODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplicar o produto na moldeira individual, colocando uma pequena quantidade (gota) de gel para cada dente.

2. Encaixe a moldeira na arcada e pressione

para que o gel entre em contato com toda a superfície dos dentes.

3. Caso haja excesso de gel, este deve ser removido com auxílio do dedo ou gaze.

4. Deixar o gel agir por 30 minutos. O tratamento consiste em usar 2 vezes ao dia (com intervalo mínimo de 6 horas entre uma aplicação e outra), o tempo de tratamento será definido pelo cirurgião-dentista, conforme sua avaliação e acompanhamento.

5. Após 30 minutos, retirar a moldeira da boca.

6. Retirar o resíduo do gel fazendo bochecho com água em abundância. Não ingerir o resíduo do gel.

7. Lave bem a moldeira, com auxílio de uma escova dental, antes de guardá-la.

8. Não escove os dentes com creme dental antes de fazer uso do produto, pois poderá gerar sensibilidade. Após o uso do clareador, esperar 30 minutos para escovar os dentes.

#### É IMPORTANTE QUE O PROFISSIONAL ESCLAREÇA AO PACIENTE:

- Materiais restauradores e próteses dentárias não clareiam e deverão ser trocados no final do tratamento.

- Dentes desvitalizados, escurecidos por tetraciclina ou com coloração acinzentada, poderão não responder ao tratamento de forma esperada.

- Evitar a ingestão de bebidas ou alimentos ácidos durante o tratamento, pois podem provocar aumento da sensibilidade. Também evitar bebidas e alimentos fortemente coloridos, porque podem comprometer o resultado final do tratamento.

#### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- Não ingerir. Observe o prazo de validade no rótulo antes do uso, não utilizar o produto com prazo de validade vencido. Em caso de contato do produto com os olhos ou pele, lavar com água em abundância e procurar orientação médica. Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos.

- A indicação e utilização do produto deverão ser feitas com acompanhamento de um cirurgião-dentista. Este produto requer o uso de moldeiras individuais para aplicação.

- Evitar o excesso de gel na moldeira, por que o paciente poderá deglutir o produto, gerando desconforto na garganta, além de causar irritação na gengiva.

- O clareamento dental pode aumentar a visibilidade de manchas de hipoplasia do esmalte (manchas brancas opacas) pré-existent.

#### CONTRA-INDICAÇÕES:

O produto é contra-indicado durante a gravidez e lactação, para pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes da fórmula, também é contra-indicado para pacientes com gengivite e/ou periodontite, pós-cirurgia periodontal, raízes expostas, cáries ou pacientes com problemas gástricos.

#### ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Mantenha o produto em temperaturas inferiores a 25°C, em ambiente seco e protegido da luz. Temperatura acima da indicada poderá alterar a composição química do produto.