Sensis_{2%}

Composição: Fluoreto de Sódio 2%, Nitrato de Potássio 5%, espessante, água purificada e conservante.

Armazenamento: Manter em lugar seco e fresco, protegido

VAL: 24 MESES

Dessensibilizante Sensis 2% é um produto a base de fluoreto de sódio (2%) que oclui os túbulos dentinários e nitrato de potássio (5%), atuando por despolarização das membranas das fibras nervosas, bloqueando a passagem de estímulos, evitando a dor. Indicado para o tratamento da hipersensibilidade dentária.

Modo de usar: 1. Realizar profilaxia nas superfícies dentárias onde será aplicado o SENSIS 2%, para eliminar a placa e/ou cálculo dental.

2.ANTES DA APLICAÇÃO RETRAIR O ÊMBOLO DA SERINGA (MÉDIA 5mm), PARA ALÍVIO DA PRESSÃO, EVITANDO-SE ASSIM A SAÍDA EXCESSIVA DO PRODUTO.

3.Dispensar com a ponta aplicadora o SENSIS 2% num pote Dappen de plástico ou silicone e aplicar o gel sobre os dentes com auxílio de um pincel ou outro instrumento aplicador (após isolamento relativo).

4. Também pode ser aplicado com moldeira individual de clareamento ou de cera dispensando o produto diretamente sobre a mesma

5.Deixar o gel agir por um período mínimo de 10 minutos. 6.Para os casos de aplicação sem moldeira, sugere-se fazer movimentos circulares suaves sobre as superfícies com gel,

durante o tempo de aplicação, utilizando-se hastes flexíveis com ponta de algodão ou disco de feltro, para melhorar a ação do produto.

7.Retirar o gel dessensibilizante com gaze e lavar com água. Precauções e contra-indicações: Não ingerir. Produto de uso exclusivo no consultório. Contra-indicado para pessoas com sensibilidade aos componentes da fórmula. Interromper o tratamento caso haja alguma reação ao produto. Pode-se reaplicar o SENSIS 2% conforme a necessidade, não excedendo uma aplicação por día.

Obs: Para uso diário utilizar o SENSIS 0.2%.

villevie

DENTALVILLE DO BRASIL LTDA CNPJ: 01.101.363/0001-86 Rua Advogado Miguel Cercal, 645 Nova Brasília - Joinville - SC - 89214-610

> Resp. Técnico: Aldo Castellani CRQ-SC 13.400.397 13ªR Reg. ANVISA: 10344110008 Fone/Fax: (47) 3454-2200

fale@villevie.com - www.villevie.com

